

Ardo Brustglocken und Einsätze

Wähle die richtige Brustglockengröße




Finde Deine Brustglockengröße, damit Du effizient und schmerzfrei abpumpen kannst:

- Drucke das Dokument in 100% Größe
- Schneide zunächst an der gestrichelten Linie entlang, dann an der durchgezogenen Linie
- Platziere die Brustwarze zum Messen in der Ecke bei der 0
- Addiere zum gemessenen Durchmesser 4 mm

Beispiel:

20 mm + 4 mm = 24mm -> Deine ideale Größe

Gibt es diese Größe nicht, wähle eine naheliegende Größe.

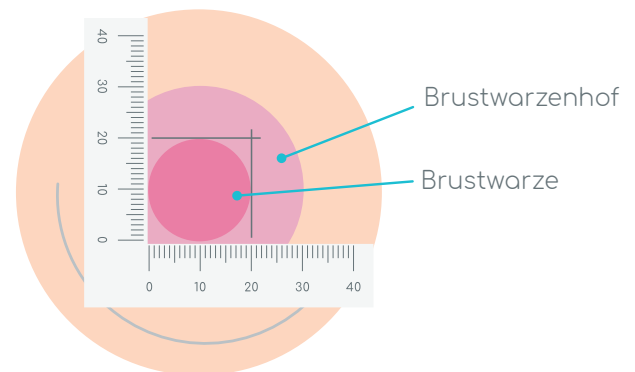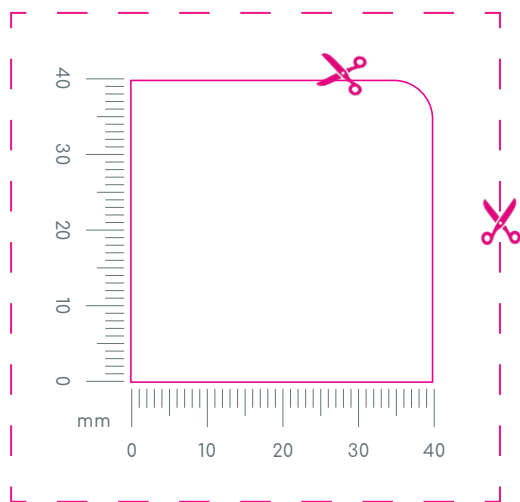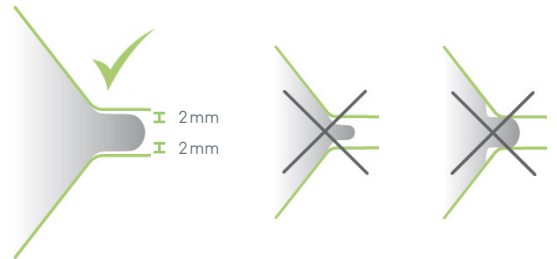

Übersicht unserer Brustglocken und -Einsätze

Brustglocken & Einsätze Kompatibilität		Ø 24mm Hands-Free Pumpset Brustglocke	Ø 24mm Melio Brustglocke	Ø 26mm Standard Brustglocke	Ø 27mm Hands-Free Pumpset Brustglocke	Ø 27mm Melio Brustglocke	Ø 31mm Standard Brustglocke	Ø 36mm Standard Brustglocke
Ø 13mm Einsatz		✓	✓	✓				
Ø 15mm Einsatz		✓	✓	✓				
Ø 17mm Einsatz		✓	✓	✓				
Ø 18mm Einsatz				✓				
Ø 19mm Einsatz		✓	✓	✓				
Ø 21mm Einsatz		✓	✓	✓				
Ø 22mm Einsatz				✓				
Ø 28mm Einsatz				✓			✓	

Alle Brustglocken und Einsätze findest Du auf ardoshop.de